

KJX Warm Massage Equipment


KJX 溫熱按摩儀器

使用說明書



KJX
KANG JIAN X I N


康健欣生化科技有限公司
KANG JIAN XING INTERNATIONAL CO.,LTD

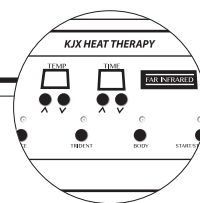

各部件名稱與配件


主機


1. 儀器主機
2. 操作面板
3. 連接孔
4. START / STOP
5. 總開關

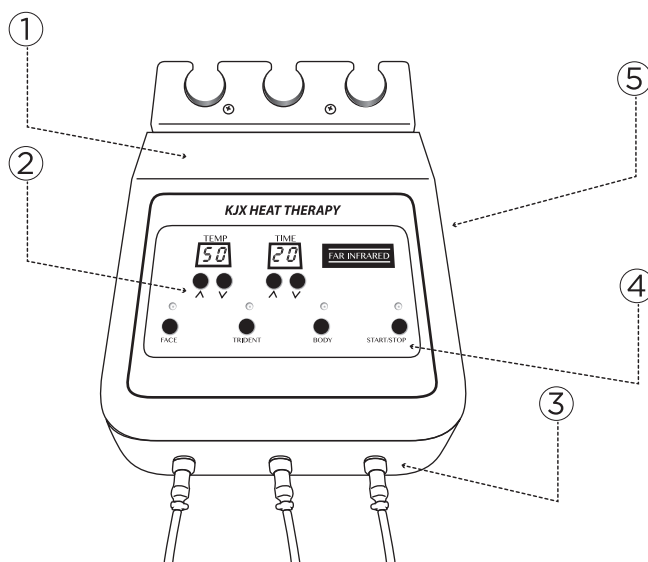

配件

1. 電源線
2. 臉部把手 (FACE)
3. 三叉把手 (TRIDENT)
4. 身體把手 (BODY)

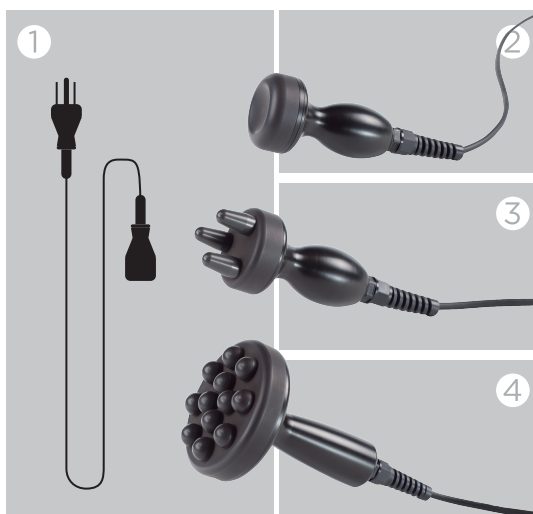

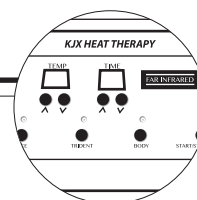


使用方式

1. 將電線插上
2. 開啟電源開關
3. 選定作用部位
4. 設定溫度
5. 設定時間
6. 按下開始

面板介紹


一、START / STOP 開始與停止按鈕

※STOP狀態：燈滅 ※START狀態：燈恆亮

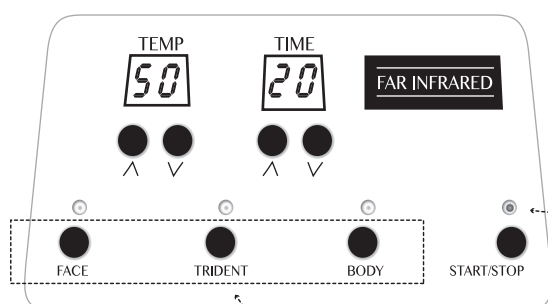

※開機處於STOP狀態，按一次
開啟START狀態，再按一次則回
復STOP狀態部位選擇按鈕

點選不同把手（開機預設 FACE 燈亮）
FACE(臉部) TRIDENT(三叉) BODY(身體)

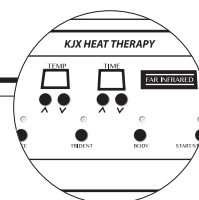


面板介紹


二、溫度顯示/ TEMP ↑ ↓ 溫度選擇按鈕

↑ 溫度往上調整1度，若持續按著不放可自動遞增

↓ 溫度往下調整1度，若持續按著不放可自動遞減

※開機預設45度 (最低30度 - 最高70度)

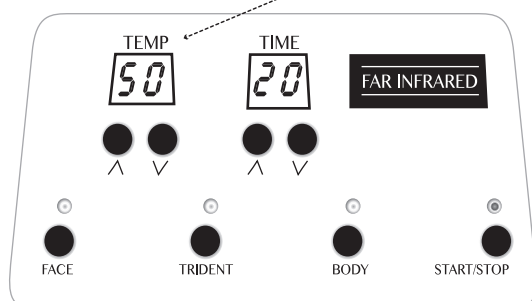

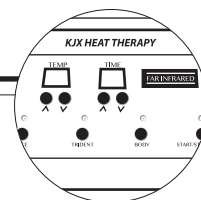

面板介紹

三、時間顯示/ TIME ↑ ↓ 時間選擇按鈕


↑ 時間往上增加1分鐘，若持續按著不放可自動遞增 (START後無法調整)


↓ 時間往下減少1分鐘，若持續按著不放可自動遞減 (START後無法調整)

※當計時至1分鐘以下時將以秒顯示

※當計時終了時將發出3聲，同時進入STOP狀態，然後時間恢復20分


※開機預設20分鐘 (最低1分鐘 – 最高60分鐘)

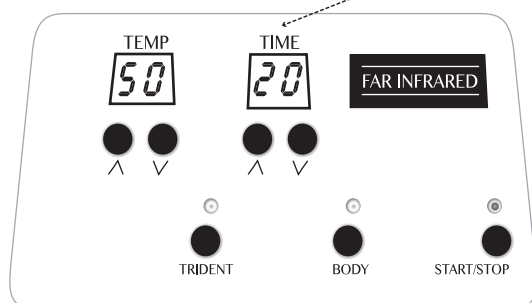

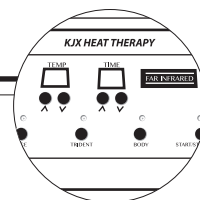

安裝方式說明

1. 臉部把手頭對應FACE孔位插上
2. 三叉把手對應TRIDENT孔位
3. 身體把手頭對應BODY孔位
4. 請將電源線接上主機電源插孔，並將插頭接上電源插座。

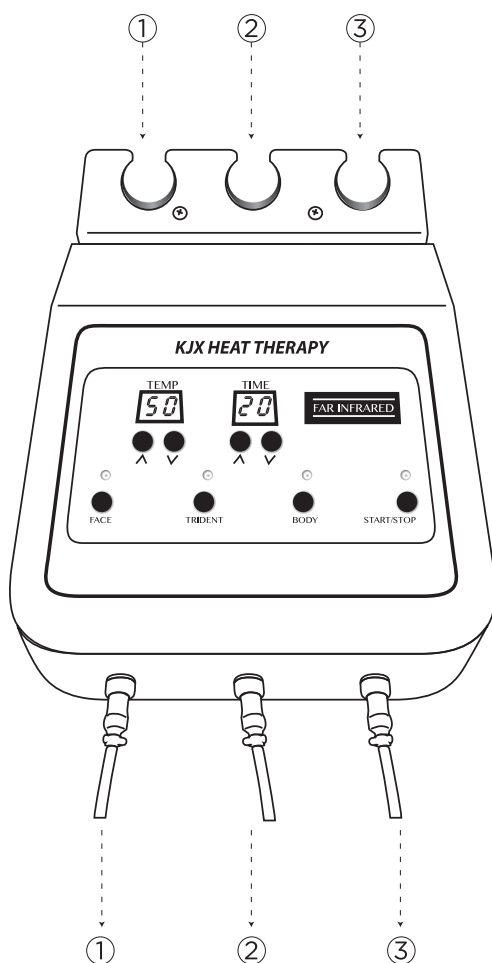

① 臉部把手
FACE




② 三叉把手
TRIDENT



③ 身體把手
BODY



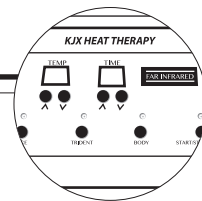

使用後事項

清潔方法

※每次使用後均應清潔主機、把手,平時應維持本產品的清潔。

※清潔前請先關閉主機總電源並從插座上拔除電源線

1. 主機清潔：

使用乾布或微濕毛巾將主機擦拭乾淨.

2. 把手清潔：

使用乾布或微濕毛巾將把手上精油或髒汙擦拭乾淨

※把手請勿使用有機溶劑或酒精擦拭


存放方法

每次使用完畢, 清潔完後, 並將儀器妥善收納。

請確實將把手置於置把架，請避免讓導線纏繞。

請勿放置於火原附近、陽光曝曬下或浴室等潮濕地方。

請把本機收納於兒童無法觸及的地方。

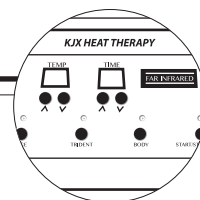

注意事項

請勿擅自拆解本產品, 避免發生危險.

切勿摔落或撞擊本產品, 這可能會引起故障

清理本產品時, 請勿直接用水沖洗, 或使用含有機溶劑的清潔劑, 避免造成本產品故障.

請勿在高溫, 潮濕, 陽光直射之場所使用或放置本產品, 避免發生故障及危險


若儀器發生故障, 應洽原購買店家詢問, 請勿自行維修

不宜使用範圍

傳染病患者

裝置心臟節律器患者

皮膚發生異常狀況, 例如有傷口、潰爛、發炎..等

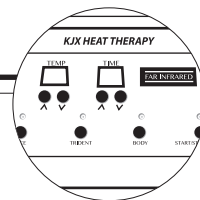

本機操作發生異常時，可先參照「排除故障」部分進行檢查。
如仍無法解決，請向當地代理商諮詢。

排除故障	
狀況	可能原因/解決方法
無法啟動	請檢查是否有確實安裝電源線並插上電插座 請按下電源總開關開啟電源
使用時把手頭沒有熱	請檢查線組連接端是否與主機連接孔確實連接 是否有故障代碼出現
故障代碼	E1>FACE線頭未插入或損壞 E2>TRIDENT線頭未插入或損壞 E3>BODY線頭未插入或損壞

產品規格

型號：TKP-C101

輸入電壓：110V~220V

消耗功率：50W

本體體積：33CM*25CM*17.2CM(長*寬*高)

本體重量：4.3kg

產地：台灣

製造商：康健欣生化科技有限公司

網址：WWW.BIO-KJX.COM

信箱：service@bio-kjx.com

地址：新北市新北產業園區五權七路52號4樓

電話：02-22989358 傳真：02-22989359