

遠紅外線溫灸儀 使用說明書

產品規格

產品名稱：遠紅外線溫灸儀

產品型號：TKD-C100

電 源：DC 12V, 2A

本體體積：W 70 x D50 x H159(mm)

本機重量：288 g


產地：台灣

製造商：康健欣生化科技有限公司

網址：www.bio-kjx.com

信箱：service@bio-kjx.com


地址：台灣新北市新北產業園區五權七路52號4樓

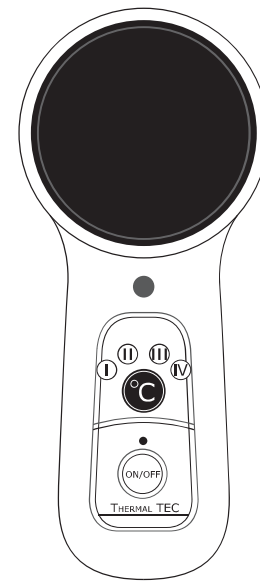

康健欣生化科技有限公司
KANG JIAN XING INTERNATIONAL CO.,LTD

TEL +886-2-2298-9358


<http://www.bio-kjx.com>

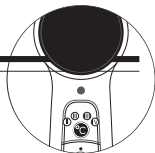

目錄

1. 各部件名稱與配件
2. 使用方法
3. 操作流程
4. 使用後事項
5. 注意事項


使用前請詳閱本說明書
請保存說明書以供日後使用參考

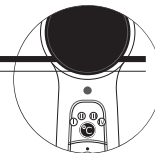

注意事項

本機操作發生異常時，可先參照「排除故障」部分進行檢查，如仍無法解決，請向當地代理商諮詢。

排除故障	
狀況	可能原因/解決方法
無法啟動遠紅外線溫灸儀	▪ 長按"ON/OFF"電源開關按鈕開機 ▪ 將本產品連接上電源供應器，並安裝於插座。
遠紅外線溫灸探頭過熱	▪ 將本產品關機，請等待1小時後再使用 ▪ 按下溫度選擇鈕，降低溫度段數，調整至適當溫度
遠紅外線溫灸儀在進行當中忽然停止	▪ 30分鐘自動定時功能已完成 ▪ 不小心按下電源開關

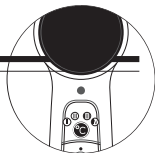

注意事項

請勿擅自拆解本產品，避免發生危險。

切勿摔落或撞擊本產品，這可能會引起故障。

清理本產品時請勿直接用水沖洗或使用含有機溶劑的清潔劑
避免造成本產品故障。


請勿在高溫、潮濕、陽光直射之場所使用或放置本產品，避
免發生故障及危險。

若儀器發生故障應洽原購買店家詢問，請勿自行維修。

不宜使用範圍:


皮膚發生異常狀況，例如有傷口、潰爛、發炎..等。

懷孕期間避免用於子宮附近部位。

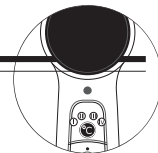



各部件名稱與配件

1. 遠紅外線陶瓷溫灸頭
2. 四段溫度指示燈
3. 溫度選擇鍵
4. 電源指示燈
5. ON/OFF電源開關
6. 電源插孔 (底部)

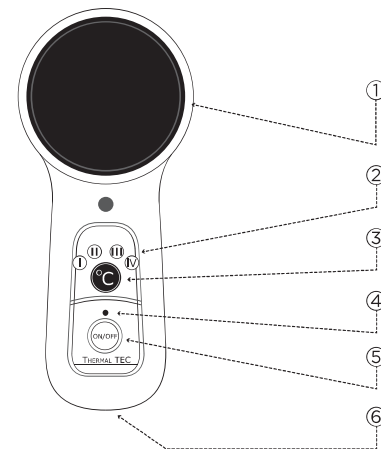

電源供應器 (100V~220V)

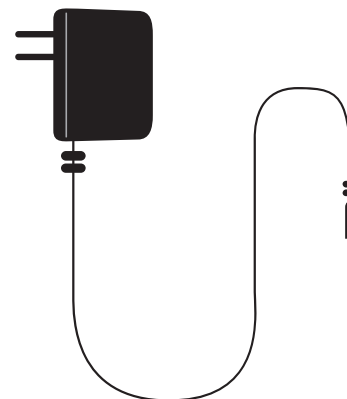

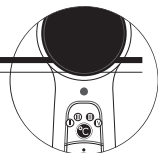



使用方法

操作介紹

- 1 將本產品裝上電源供應器並將電源供應器安裝於電源插座上。
- 2 長按3秒  按鈕開啟電源或關閉電源。
※開機預設為LEVEL I 溫度模式(38°C)。
- 3 溫度選擇鍵, 每按一次  選擇按鈕可切換溫度段數。

※開始時請先使用第一段溫度。


※請依個人需要選擇適合的溫度。

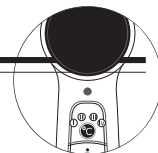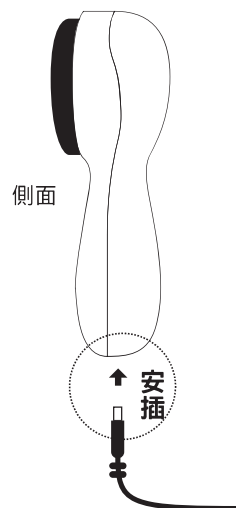

使用後事項

存放方法

- 每次使用後均應清潔主機，並妥善保管。
- 請勿放置於火源附近、陽光曝曬下或浴室等潮濕地方。
- 請把本機放置在於兒童無法觸及的地方。

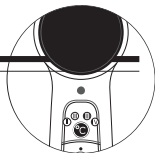


使用後事項

清潔方法


- 1 請先關閉電源，並將電源供應器從插座拔除。
- 2 以乾布或微濕毛巾將探頭與機身上殘留的保養品擦拭乾淨。

※每次使用後應清理主機，平時應維持本產品的清潔。

※注意：不可用水沖洗或浸泡在水中。

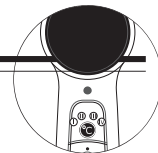

使用方法

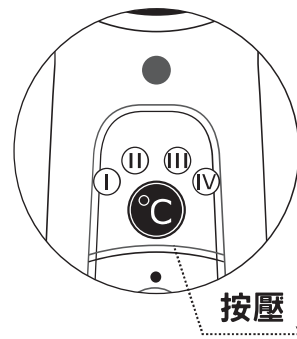

- I. 38°C
↓ °C 按
- II. 42°C
↓ °C 再按
- III. 46°C
↓ °C 再按
- IV. 50°C

**連續按壓溫度鍵
選擇不同溫度**

電源開啟初始狀態為38°C

內部計時器

當電源開啟時間達30分鐘後
將自動關閉電源

按鍵提示聲


按鍵每按一次將發出一短聲


LEVEL I. 38°C (±3°C) 適合小孩 敏感肌膚

LEVEL II. 42°C (±3°C) 適合成年人 一般肌膚

LEVEL III. 46°C (±3°C) 適合經常艾灸、汗蒸、體寒者

LEVEL IV. 50°C (±3°C) 適合體質寒冷、對溫熱敏感度較低者，建議可隔衣布使用

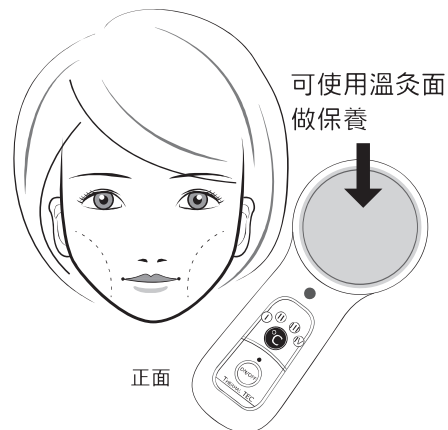

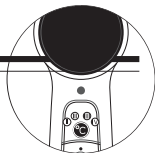

操作流程


開始進行使用 (建議使用方法)

選擇您所需要的溫度，即可開始使用儀器。


※可直接使用，亦可搭配精油、乳液做使用




面部

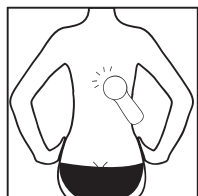


背部、腰部

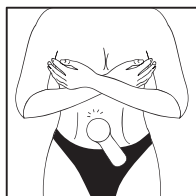

腹部周圍

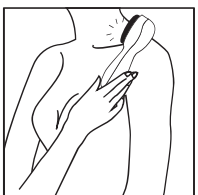

肩頸

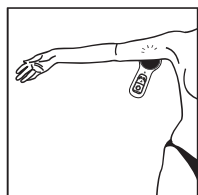


手臂



小腿



大腿

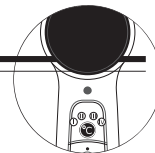

操作流程

使用結束

關閉提示聲

當電源開啟時間達30分鐘關閉電源前，將發出3次2短聲。

使用結束後，請關閉電源並從插座上拔除變壓器，清潔主機後請妥善收納。

當電源開啟時間達30分鐘後將自動關機，若需繼續使用，請重新啟動。